


Saint-Evarzec, le 17 avril 2020

MASQUE BARRIERE 3 PLIS

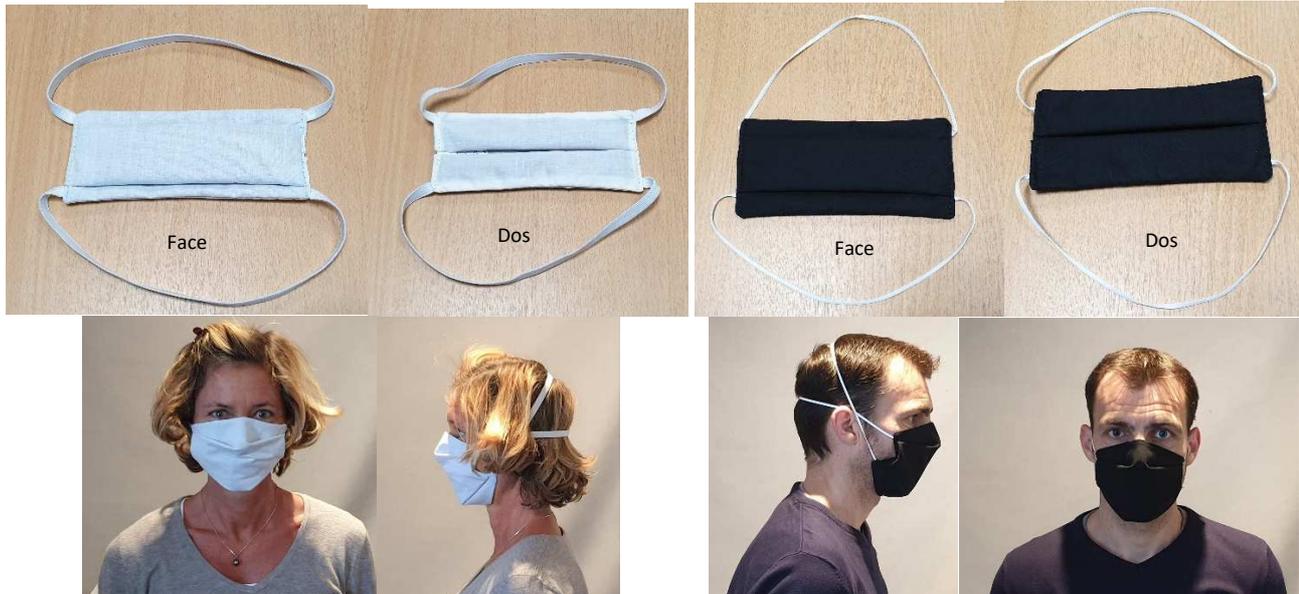

DESCRIPTIF

- masque barrière 3 plis,
- 2 brides élastiques.
- 2 faces extérieures en polycoton 120g/m², 50% coton - 50% polyester,
- couche intérieure 100% polypropylène intissé 70g/m²,
- conforme à la norme OEKO-TEX® classe 2.

Coloris : NOIR ou BLANC

Conditionnement : sachet de 10 pièces / carton de 50 pièces

DOMAINE D'APPLICATION

Ces masques en tissu réutilisables et lavables sont dits « barrières ». Ils sont destinés à l'usage par des personnes saines ne présentant pas de symptôme clinique d'infection virale et n'étant pas en contact avec des personnes présentant de tels symptômes. Son port limité à une demi-journée permet de constituer une barrière de protection contre une éventuelle pénétration virale dans la zone bouche et nez de son utilisateur ou d'une personne se trouvant à proximité en évitant les projections. Il a également pour vocation de protéger cette zone contre tout contact avec les mains.

AVERTISSEMENT Le masque barrière n'exonère absolument pas l'utilisateur de l'application des gestes barrières complétés par la mesure de distanciation sociale qui sont essentiels.
Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2). *Les masques que nous fabriquons ont été conçus à partir de spécifications S76-001:2020 publiées par l'AFNOR.*
Le masque barrière n'est pas soumis à une évaluation de conformité par des organismes notifiés ou laboratoires. Sa conception selon les règles de l'art, sa fabrication et son contrôle de qualité de la production restent à la responsabilité du fabricant.

OUTILS OCEANS


SAS au capital de 87 124 € -RC339806036

ZAC de Troyalac'h -10 rue Nicolas APPERT - 29170 SAINT-EVARZEC

TEL : +33 (0)2 98 94 63 03 -TELECOPIE +33 (0)2 98 94 68 22

contact@outils-oceans.com - www.outils-oceans.com



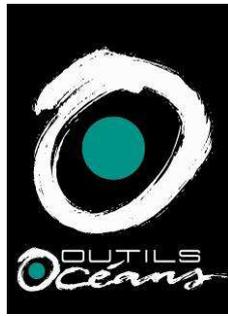

MODE D'EMPLOI

Lavage :

Avant la 1^{ère} utilisation et entre chaque utilisation le masque doit être lavé en machine sans essorage à 60°C pendant 30 min minimum.

Remarques : pas de blanchiment, pas de séchage en machine, pas de repassage, pas de nettoyage à sec. Bien nouer entre elles les brides lors du lavage afin que ces dernières ne s'entremêlent pas.



Port du masque et durée d'utilisation :

La mise en place du masque barrière s'effectue comme suit en s'étant préalablement lavé les mains :



Le port du masque doit être limité à 4H.

Le masque barrière doit être lavé chaque fois qu'il est souillé, mouillé ou mal positionné sur le visage. Il convient de ne pas le mettre en position d'attente sur le front ou sous le menton pendant et après son utilisation.



Dans une même période de 4H le masque ne peut servir plusieurs fois que s'il est retiré selon les consignes, stocké provisoirement ou accroché pour offrir le moins de contact possible et remis selon les consignes.

Retirer le masque, stocker le masque à laver, jeter le masque :

Pour ne pas être contaminé lors du retrait du masque barrière, il doit être correctement retiré et isolé, soit pour être jeté, soit pour être lavé. Pour cela il est recommandé de retirer ses gants de protection (si concerné), se laver les mains à l'eau et au savon ou par friction de gel hydroalcoolique, retirer le masque en saisissant les brides élastiques par l'arrière sans toucher la partie avant du masque.

Placer le masque à jeter dans une poubelle munie d'un couvercle à commande non manuelle et d'un sac.

Placer le masque à laver dans un contenant spécifique type sac plastique propre. Se laver à nouveau les mains, nettoyer l'extérieur du contenant spécifique avec un produit nettoyant.



Masque à laver

Masque à jeter

OUTILS OCEANS

SAS au capital de 87 124 € -RC339806036

ZAC de Troyalac'h -10 rue Nicolas APPERT - 29170 SAINT-EVARZEC

TEL : +33 (0)2 98 94 63 03 -TELECOPIE +33 (0)2 98 94 68 22

contact@outils-oceans.com - www.outils-oceans.com

